



Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant

- ▲ Desinfetante à base de peróxido de hidrogênio registrado na Anvisa.
- ▲ Amplo espectro de ação.
- ▲ Efetivo contra o Norovírus, Coronavírus SARS, Influenza vírus H1N1, *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes* e *Klebsiella pneumoniae* (KPC).
- ▲ Indicado para limpar e desinfetar artigos não críticos, vidro, macas, mesas, bancadas, utensílios de metal, janelas, pisos, vidros e outras superfícies.
- ▲ Rápido tempo de ação * e alto rendimento
- ▲ Não necessita de EPI**

Um produto para limpeza e desinfecção em uma única etapa

TEMPO DE AÇÃO DE APENAS
3 MINUTOS[†]

* Em comparação com desinfetantes à base de quaternários e cloro

** Uma vez diluído de acordo com as instruções de uso

† Na diluição de 32 mL/L



AJUDA A PROTEGER SEUS FUNCIONÁRIOS, PACIENTES E VISITANTES

BENEFÍCIOS

- ▲ Simplifica o processo de limpeza
- ▲ Aumenta a eficiência operacional
- ▲ Reduz o número total de produto
- ▲ Reduz o tempo de treinamento dos seus funcionários de limpeza



3 em 1

- Desinfetante
- Limpa superfícies
- Limpa vidros

Ação desinfetante em **3-5 minutos** (Elimina **99,999%** dos microrganismos) com um amplo espectro de ação.¹ Mata o Norovírus em 45 segundos.²



Não necessita de equipamento de proteção individual



¹ quando diluído conforme as instruções de uso

² para desinfetantes com diluição de 47 ml/L

DILUIÇÃO E TEMPO DE AÇÃO

O Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant pode ser utilizado em 2 diluições:

- ▲ Para limpeza use de 3-6 mL/L
- ▲ Para limpeza e desinfecção em uma única etapa use 32 mL/L com tempo de contato de 3 minuto



Nome do produto	Código	Embalagem
Oasis Pro Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant	7103920	2x2L
	7103921	4,5L

Produto Saneante Registrado M.S, nº 3.0053.0908.

Autorização de funcionamento M.S. nº 3.00053-9.

Entre em contato com um representante da Ecolab para mais informações
Brasil - 0800 704 1409